

Handleiding voor monsterafname

Bewaar het serie- en het codenummer van uw testset!

Het serie- en het codenummer treft u aan op de binnen- of buitenzijde van het testpakket. Het serienummer bevat 8 cijfers en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 4 cijfers.

Aanwijzingen voor het opvragen van de uitslagen

Monsterbegeleidingsformulier: Veld „Inzender-etiket“

Wanneer u een uitslag met therapie-advies wilt ontvangen, vul dan in het veld „Inzender-etiket“ het praktijkadres van uw behandelend therapeut of arts in. Uw therapeut ontvangt dan een uitslag met aanvullend een therapie-advies. NB: Aan particulieren worden nooit therapie-adviezen verstrekt.

Monsterbegeleidingsformulier / Download van uw uitslagen

Als u op het monsterbegeleidingsformulier alle persoonsgegevens volledig invult, dan ontvangt u uw uitslag automatisch per post toegestuurd. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid de uitslag via internet in te zien en te downloaden.

Om uw uitslag te downloaden gaat u naar onze website www.medivere.nl en klik op het tabblad ‚uitslag opvragen‘. Onder „Uitslag opvragen“ vult u het serie- en codenummer van uw testpakket en uw geboortedatum in. Het serie- en het codenummer treft u aan op de binnen- of buitenzijde van het testpakket. Het serienummer bevat 8 cijfers en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 4 cijfers.

Na het invullen van serienummer, code en geboortedatum klikt u op „uitslag opvragen“ om uw persoonlijke uitslag te bekijken.

Wanneer u een anonieme uitslag (zonder naam en adresgegevens) wenst, dan vult u op het monsterbegeleidingsformulier alleen uw geslacht en geboortedatum in. Let op: deze gegevens moeten echt ingevuld worden, anders is er geen vergelijking mogelijk met mensen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijdscategorie.

Wilt u een anonieme uitslag, dan is toesturen van de uitslag per post niet mogelijk en kunt u deze alleen online inzien en (wanneer gewenst) downloaden.

Garantie

Wij willen graag dat u tevreden bent met ons product. Mocht uw testpakket niet compleet zijn, verkeerd zijn ingepakt, of is tijdens het uitvoeren van de test iets misgegaan, neem dan contact met ons op. Bel naar **088-0075777** of mail naar info@medivere.nl. Houd het serie- en codenummer van uw testset bij de hand. Deze nummers kunt u vinden aan de binnen- of buitenkant van uw testset. Wij sturen u zo spoedig mogelijk nieuwe onderdelen of een vervangend testpakket toe.



*medivere GmbH Mainz
Vertengwoordigd door:
Yours Healthcare
Borculo*

*Telefoon: +31-(0)88-0075777
of
info@medivere.nl*

Handleiding voor monsterafname

Teken-test

Vooraf: Lees eerst de handleiding helemaal door voordat u aan de uitvoering van de test begint!

Is uw testpakket volledig?

Controleer a.u.b. of uw testset volledig is. Het moet bevatten:

- 1 Handleiding voor monsterafname
- 1 Handleiding voor de uitslagen
- 1 Monsterbegeleidingsformulier
- 1 Garantiefomulier
- Teken verwijderingsset (compleet)
- 1 Etiket met opdruk „Teek datum, Naam“
- 1 Verzendenvelop

Test-Voorbereiding


Als u een teek op het lichaam ontdekt, dan moet u deze zo snel mogelijk verwijderen om het besmettingsrisico te verminderen.

Oude huismiddeltjes zoals lijm of olie moeten in geen geval worden gebruikt om de teek te doden!

In zijn doodsstrijd injecteert de teek nog meer ziekteverwekkers in de steekwond. Ook het fijnknippen van het tekenlichaam moet u in ieder geval vermijden, omdat hierdoor bestaande ziekteverwekkers worden geïnjecteerd in het lichaam. Om deze reden is het ook sterk af te raden een tekentang te gebruiken.

Test-Uitvoering

1. Breek de tekenverwijderaar uit de kaart en schuif deze volledig onder het tekenlichaam. Met het vergrootglas kan de voortgang gecontroleerd worden. Til de tekenverwijderaar op, om de teek te verwijderen.
Hef de tekenverwijderaar op, om de teek te verwijderen.
2. Doe de teek in het transportbuisje.
3. Sluit het transportbuisje met de deksel van het vergrootglas.
4. Doe het transportbuisje met de teek samen met het monsterbegeleidingsformulier in de verzendenvelop. Stuur deze per post aan ons laboratorium retour.

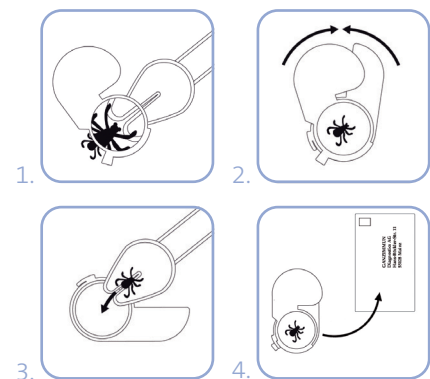

Dank u voor uw medewerking!
Uw medivere-team