

Handleiding voor monsterafname

Bewaar het serie- en het codenummer van uw testset!

Het serie- en het codenummer treft u aan op de binnen- of buitenzijde van het testpakket. Het serienummer bevat 8 cijfers en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 4 cijfers.

Aanwijzingen voor het opvragen van de uitslagen

Monsterbegeleidingsformulier: Veld „Inzender-etiket“

Wanneer u een uitslag met therapie-advies wilt ontvangen, vul dan in het veld „Inzender-etiket“ het praktijkadres van uw behandelend therapeut of arts in. Uw therapeut ontvangt dan een uitslag met aanvullend een therapie-advies. NB: Aan particulieren worden nooit therapie-adviezen verstrekt.

Monsterbegeleidingsformulier / Download van uw uitslagen

Als u op het monsterbegeleidingsformulier alle persoonsgegevens volledig invult, dan ontvangt u uw uitslag automatisch per post toegestuurd. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid de uitslag via internet in te zien en te downloaden.

Om uw uitslag te downloaden gaat u naar onze website www.medivere.nl en klik op het tabblad ‚uitslag opvragen‘. Onder „Uitslag opvragen“ vult u het serie- en codenummer van uw testpakket en uw geboortedatum in. Het serie- en het codenummer treft u aan op de binnen- of buitenzijde van het testpakket. Het serienummer bevat 8 cijfers en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 4 cijfers.

Na het invullen van serienummer, code en geboortedatum klikt u op „uitslag opvragen“ om uw persoonlijke uitslag te bekijken.

Wanneer u een anonieme uitslag (zonder naam en adresgegevens) wenst, dan vult u op het monsterbegeleidingsformulier alleen uw geslacht en geboortedatum in. Let op: deze gegevens moeten echt ingevuld worden, anders is er geen vergelijking mogelijk met mensen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijdscategorie.

Wilt u een anonieme uitslag, dan is toesturen van de uitslag per post niet mogelijk en kunt u deze alleen online inzien en (wanneer gewenst) downloaden.

Garantie

Wij willen graag dat u tevreden bent met ons product. Mocht uw testpakket niet compleet zijn, verkeerd zijn ingepakt, of is tijdens het uitvoeren van de test iets misgegaan, neem dan contact met ons op. Bel naar **088-0075777** of mail naar info@medivere.nl. Houd het serie- en codenummer van uw testset bij de hand. Deze nummers kunt u vinden aan de binnen- of buitenkant van uw testset. Wij sturen u zo spoedig mogelijk nieuwe onderdelen of een vervangend testpakket toe.



*medivere GmbH Mainz
Vertengwoordigd door:
Yours Healthcare
Borculo*

*Telefoon: +31-(0)88-0075777
of
info@medivere.nl*

Handleiding voor monsterafname

Speekseltest Melatonine plus

Vooraf: Lees eerst de handleiding helemaal door voordat u aan de uitvoering van de test begint!

Is uw testpakket volledig?

Controleer a.u.b. of uw testset volledig is. Het moet bevatten:

- 1 Handleiding voor monsterafname
- 1 Monsterbegeleidingsformulier
- 1 Handleiding voor de diagnoseresultaten
- 1 Garantieformulier
- 3 Gekleurde speekselbuisjes
- 3 Rietjes
- 3 Etiketten met opdruk „Naam, Datum, Tijd“
- 1 Verzendbuisje
- 1 Verzendenvelop

Test-voorbereiding

Wij verzoeken u om op de dag van de test de volgende regels na te leven:

1. Gebruik geen mondwater / mondspoelingen.
2. Vermeng het speeksel niet met bloed (bijvoorbeeld door bloedend tandvlees).
3. Spoel direct voor de monsternaam de mond met helder water.
4. Neem speekselmonsters af voor het tandenpoetsen of minimaal 30 minuten erna.

Test-Uitvoering

De monsterafname moet op onderstaande tijdstippen, bij voorkeur in het weekeinde, plaatsvinden.

Monster 1: 20:00 uur
 Monster 2: 24:00 uur
 Monster 3: 2:00 uur

1. Neem het rietje in de mond en vul het speekselbuisje voor minimaal de helft met speeksel (schuim niet meetellen).
2. Doe de dop goed op het speekselbuisje. Het gebruikte rietje kan bij het huisvuil.
3. Noteer op het etiket de datum en het tijdstip van de monsternaam en de naam van de monsternemer en plak het etiket op het speekselbuisje.

4. Doe het speekselbuisje in het verzendbuisje. Bewaar het verzendbuisje vervolgens in de koelkast tot aan het verzenden.
5. Vervolgens neemt u de overige 2 monsters volgens het schema af en dat doet u op dezelfde manier als hierboven beschreven is.
6. Stop het verzendbuisje (met daarin de gevulde speekselbuisjes) samen met het ingevulde monsterbegeleidingsformulier in de verzendenvelop. Stuur deze per post aan ons laboratorium retour.

De retourzending moet bij voorkeur op maandag tot en met woensdag (voor de buslichting) plaatsvinden en niet in het weekeinde of voor feestdagen.

Dank u voor uw medewerking!
Uw medivere-team



*medivere GmbH Mainz
Vertegenwoordigd door:
Yours Healthcare
Borculo*

*Telefoon: +31 - (0)88 - 00 75 777
of info@medivere.nl*