

Handleiding voor monsterafname

Speekseltest Melatonine plus

Let op: Lees eerst de gehele handleiding goed door alvorens u aan de uitvoering begint!

Is uw testpakket volledig?

Kijkt u a.u.b. na of uw pakket volledig is.
Het moet bevatten:

- 1 Handleiding voor monsterafname
- 1 Handleiding voor de uitslag
- 1 Monster begeleidingsformulier
- 1 Garantieformulier
- 3 Speekselbuisjes
- 3 Etiketten voor de monsters 1-3 met opdruk „Naam, Datum, Tijd“
- 3 Rietjes
- 1 Verzendsbuisje
- 1 Verzendenvelop

Test-voorbereiding

Op de dag van de test moet u het volgende in acht nemen:

1. geen mondwater / geen mondspoelingen toepassen
2. het speeksel **niet met bloed vermengen** bijvoorbeeld door tandvleesbloeding
3. voor de speekselmonsters **de mond met helder water spoelen**
4. speekselmonsters voor het tandenpoetsen of minimaal 30 min erna afnemen

Test-Uitvoering

De monsterafname moet op onderstaande tijdstippen, bij voorkeur in het weekeinde, plaatsvinden.

Monster 1: 20:00 uur
 Monster 2: 24:00 uur
 Monster 3: 2:00 uur

1. Doe het speeksel door het rietje in een speekselbuisje. Het busje moet **minstens voor de helft** met speeksel gevuld zijn. (schuim niet meetellen).
2. De dop van het speekselbuisje zorgvuldig sluiten.

3. De bijbehorende etiketten van datum, tijdstip en naam voorzien en deze op de bovenzijde van het speekselbuisje plakken.
4. Doe de speekselbuisjes in het verzendbuisje. Deze vervolgens in de koelkast bewaren tot aan het verzenden.
5. Gooi s.v.p. de rietjes weg met het huisvuil.
6. Doe de 3 gevulde speekselbuisjes samen met het ingevulde monsterbegeleidingsformulier in de verzendvelop. Verzend deze per post aan ons laboratorium retour.

De retourzending moet bij voorkeur van maandag tot woensdag plaatsvinden en niet in het weekeinde of voor feestdagen.

Dank u voor uw medewerking!
Uw medivere-team



*medivere GmbH Mainz
Vertegenwoordigd door:
Yours Healthcare
Borculo*

*Telefoon: +31 - (0)88 - 00 75 777
of
info@medivere.nl*