

Aanwijzingen voor het opvragen van de uitslag / Garantie informatie

Let op! Bewaar het serie- en codenummer van uw testset!

Deze codes heeft u nodig voor het verkrijgen van uw uitslag. U vindt deze codes op de binnen- of buitenzijde van het testpakket.

Monsterbegeleidingsformulier: Veld „praktijkgegevens“

Wanneer u wilt dat uw behandelend therapeut / arts uw uitslag ook ontvangt, vul dan in het veld 'praktijkgegevens' het praktijkadres in. (Wanneer er een praktijkcode bekend is, dan volstaat deze praktijkcode ook). Uw therapeut / arts ontvangt dan een uitslag met aanvullend therapie-advies. NB. aan particulieren worden nooit therapie adviezen verstrekt.

Na het invullen van serie-, codenummer en geboortedatum klikt u op 'uitslag opvragen' om uw persoonlijke uitslag te bekijken.

Wanneer u een anonieme uitslag (zonder naam en adresgegevens) wenst, dan vult u op het monsterbegeleidingsformulier alleen uw geslacht en geboortedatum in. Let op: deze gegevens moeten echt ingevuld worden, anders is er geen vergelijking mogelijk met mensen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijdscategorie.

Download van uw uitslagen

Om uw uitslag te downloaden gaat u naar onze website www.medivere.nl en klikt u op het tabblad 'uitslag opvragen'. Onder 'uitslag opvragen' vult u het serie- en codenummer van uw testpakket en uw geboortedatum in. Het serie- en het codenummer treft u aan op de binnen- of buitenzijde van het testpakket. Het serienummer bevat 8 cijfers en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 4 cijfers.

Garantie

Wij willen graag dat u tevreden bent met ons product. Mocht uw testpakket niet compleet zijn, verkeerd zijn ingepakt, of is tijdens het uitvoeren van de test iets misgegaan, neem dan contact met ons op. Kijk op www.medivere.nl bij 'vragen?', bel naar **088 0075777** of mail naar info@medivere.nl. Houd het serie- en codenummer van uw testset bij de hand. Deze nummers kunt u vinden aan de binnen of buitenkant van uw testset. Wij sturen u zo spoedig mogelijk de benodigde onderdelen toe.



*medivere GmbH Mainz
vertegenwoordigd door:
Gamedi Healthcare
Bosberg 41
7271 LE Borculo*

*Telefoon: +31 - (0)88 - 00 75 777
of info@medivere.nl*

Handleiding voor monstername

Vaginaal microbioom

Vooraf: Lees eerst de handleiding **helemaal** door voordat u aan de uitvoering van de test begint!

Is uw testset volledig?


Controleer a.u.b. of uw testset volledig is.
Het moet bevatten:

- 1 Handleiding voor monsterafname
- 1 Handleiding voor diagnoseresultaten
- 1 Monsterbegeleidingsformulier
- 1 pH-meetstaafje
- 1 benodigheden voor vaginaal uitstrijkje (wattenstaaf en wattenstaafbuisje)
Let op: het busje bevat een etsende vloeistof. Vermijd het contact daarmee. De stabilisator niet schudden.
- 1 etiket om daarop de pH-waarde te noteren
- 1 Verzendsbusje voor wattenstaafbuisje
- 1 Verzendenvelop



Test-Uitvoering

1. Was uw handen voordat u met de test begint.
2. Voor de bepaling van de **pH-waarde** neemt u een pH-wattenstaafje uit de folie. **Indicatorkleur voor gebruik: donker kaki.** Let erop dat de **indicator niet in aanraking komt met uw vingers of vloeistoffen.**
3. Houd het pH-wattenstaafje aan het uiteinde van de schacht tussen duim en wijsvinger vast (zie afb. 1).
4. Steek het pH-wattenstaafje voorzichtig 2-3 cm in de vagina – zoals bij het gebruik van een tampon.
5. Door de **lichte rotatie van het wattenstaafje** komt de indicatorlaag in contact met de vaginawand resp. met de vaginale inhoud (zie afb. 2).
6. Overeenkomstig de zuurwaarde is er een verkleuring.

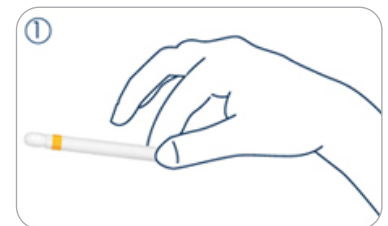

(Zie de achterzijde voor het vervolg van de handleiding)

(Vervolg van pagina 1)

7. Lees het resultaat **onmiddellijk** af nadat u het pH-wattenstaafje hebt uitgetrokken. Vergelijk de kleur van de indicator met de kleurenschaal (zie afb. 3). Vaginale pH-swabs tot 4,5 liggen in het normale / gezonde bereik.

8. Noteer het **resultaat op het bijgevoegde etiket** en plak dit op het **wattenstaafbuisje**. Noteer dit ook bovenaan het **monsterbegeleidingsformulier**.

9. Het pH-wattenstaafje kan bij het huisvuil.

10. Neem nu een **vaginaal uitstrijkje** met het bijgesloten droge wattenstaafje.


GEVAAR! Het bijgesloten wattenstaafje mag voor de afname NIET met de vloeistof van het wattenstaafbuisje bevochtigd worden. Risico op brandwonden!

11. Draai de blauwe dop van het verzendbuisje open en steek het wattenstaafje in de vloeistof.

12. Breek het bovenste deel van de wattenstaafjedrager aan de rand van het wattenstaafbuisje af en sluit dit busje goed. Gooi het afgebroken onderdeel weg.

13. Stop het wattenstaafbuisje in het witte verzendbuisje en draai dit dicht.

14. Stop uw monster samen met het **ingevulde en ondertekende monsterbegeleidingsformulier** in de verzendvelop en stuur het geheel naar ons laboratorium.

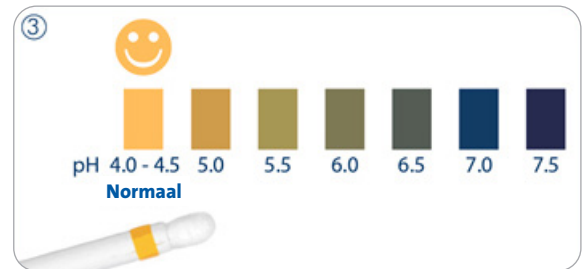

De retourzending moet op maandag of dinsdag (voor de buslichting) plaatsvinden en niet in het week-einde of voor feestdagen.

Dank u voor uw medewerking!
Uw medivere-team



medivere GmbH Mainz
Vertengwoordigd door:
Gamedi BV
Borculo

Telefoon: +31 - (0)88 - 00 75 777
of info@medivere.nl