

Handleiding voor monsterafname

Bewaar het serie- en het codenummer van uw testset!

Het serie- en het codenummer treft u aan op de binnen- of buitenzijde van het testpakket. Het serienummer bevat 8 cijfers en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 4 cijfers.

Aanwijzingen voor het opvragen van de uitslagen

Monsterbegeleidingsformulier: Veld „Inzender-etiket“

Wanneer u een uitslag met therapie-advies wilt ontvangen, vul dan in het veld „Inzender-etiket“ het praktijkadres van uw behandelend therapeut of arts in. Uw therapeut ontvangt dan een uitslag met aanvullend een therapie-advies. NB: Aan particulieren worden nooit therapie-adviezen verstrekt.

Monsterbegeleidingsformulier / Download van uw uitslagen

Als u op het monsterbegeleidingsformulier alle persoonsgegevens volledig invult, dan ontvangt u uw uitslag automatisch per post toegestuurd. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid de uitslag via internet in te zien en te downloaden.

Om uw uitslag te downloaden gaat u naar onze website www.medivere.nl en klik op het tabblad „uitslag opvragen“. Onder „uitslag opvragen“ vult u het serie- en codenummer van uw testpakket en uw geboortedatum in. Het serie- en het codenummer treft u aan op de binnen- of buitenzijde van het testpakket. Het serienummer bevat 8 cijfers en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 4 cijfers.

Na het invullen van serienummer, code en geboortedatum klikt u op „uitslag opvragen“ om uw persoonlijke uitslag te bekijken.

Wanneer u een anonieme uitslag (zonder naam en adresgegevens) wenst, dan vult u op het monsterbegeleidingsformulier alleen uw geslacht en geboortedatum in. Let op: deze gegevens moeten echt ingevuld worden, anders is er geen vergelijking mogelijk met mensen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijdscategorie.

Wilt u een anonieme uitslag, dan is toesturen van de uitslag per post niet mogelijk en kunt u deze alleen online inzien en (wanneer gewenst) downloaden.

Garantie

Wij willen graag dat u tevreden bent met ons product. Mocht uw testpakket niet compleet zijn, verkeerd zijn ingepakt, of is tijdens het uitvoeren van de test iets misgegaan, neem dan contact met ons op. Bel naar **088-0075777** of mail naar info@medivere.nl. Houd het serie- en codenummer van uw testset bij de hand. Deze nummers kunt u vinden aan de binnen- of buitenkant van uw testset. Wij sturen u zo spoedig mogelijk nieuwe onderdelen of een vervangend testpakket toe.



*medivere GmbH Mainz
Vertengwoordigd door:
Yours Healthcare
Borculo*

*Telefoon: +31-(0)88-0075777
of
info@medivere.nl*

Handleiding voor monsterafname

Ontlastingstest

Vooraf: Lees eerst de handleiding **helemaal door voordat u aan de uitvoering van de test begint!**

Is uw testpakket volledig?

Controleer a.u.b. of uw testset volledig is. Het moet bevatten:

- 1 Handleiding voor monsterafname
- 1 Handleiding voor diagnoseresultaten
- 1 Monsterbegeleidingsformulier
- 1 Garantieformulier
- 1 Monsterbuisje
- 1 Ontlastingopvangmateriaal
- 1 Verzendenvelop

Test-voorbereiding

Vlakspoeltoilet:

„Deo-middelen“ (toiletblokjes e.d.) verwijderen en naspoelen. De ontlasting mag niet met urine vermengd worden. Leg eventueel toiletpapier op het toilet, zodat de ontlastingsmonsters niet vervuild raken.

Diepspoeltoilet:

Bevestig het meegeleverde ontlastingopvangmateriaal op het achterste deel van de toiletzitting. De ontlasting mag niet met water of urine in aanraking komen.

Test-Uitvoering

Let op: Ontlastingsmonsters moeten binnen 5 dagen na de monsternaam bij ons laboratorium aangekomen zijn. Zorg er daarom voor dat u op maandag of dinsdag de monsters neemt én verstuurt (voor de buslichting).

1. Gebruik de afnamelepel uit het monsterbuisje om op 3 verschillende plaatsen in de ontlasting monsters af te nemen.
2. Doe het monstermateriaal in het monsterbuisje tot de gemarkeerde vulhoogte (1/2 buisje).
3. Sluit het buisje goed af.
4. Steek het ontlastingsmonsterbuisje in het verzendbuisje.
5. Stop het verzendbuisje (met daarin het ontlastingsmonsterbuisje) samen met het compleet ingevulde monsterbegeleidingsformulier in de verzendenvelop.
6. U kunt het monster tot aan de verzending in de koelkast bewaren (niet invriezen).

De retourzending mag uitsluitend op maandag en dinsdag (voor de buslichting) plaatsvinden en niet in het weekeinde of voor feestdagen.

Dank u voor uw medewerking!
Uw medivere-team

Deze handleiding geldt voor de volgende testen:

*Darmcheck kind
Darmpoliepen preventie
Darmpoliepen Voorzorg test plus
Darmslijmvlies Test
Florastatus
Gezondheidscheck Darm
Gezondheidscheck Darm plus
Gluten
Heliobacter Pylori
Parasieten
Schimmel ontlastingstest
Viscera ontlastingstest
Zonuline ontlastingstest
Aantonen spijsverteringsresiduen*



*medivere GmbH Mainz
Vertegenwoordigd door:
Yours Healthcare
Borculo*

*Telefoon: +31 - (0)88 - 00 75 777
of info@medivere.nl*