

Handleiding voor monsterafname

Ontlastingstest

Let op: Lees eerst de gehele handleiding goed door, voordat u aan de uitvoering begint!

Is uw testpakket volledig?

Kijkt u a.u.b. na of uw pakket volledig is. Het moet bevatten:

- 1 Handleiding voor monsterafname
- 1 Handleiding voor diagnoseresultaten
- 1 Monsterbegeleidingsformulier
- 1 Garantieformulier
- 1 Monsterbuisje
- 1 Ontlasting opvangmateriaal
- 1 Verzendenvelop

Deze handleiding geldt voor de volgende testen:

*Aantonen spijsverteringsresiduen
Darm-Microbioom Ontlastingstest
Darmcheck kind
Darmpoliepen preventie
Darmpoliepen Voorzorg test plus
Darmslijmvlies Test
Florastatus
Gezondheidscheck Darm
Gezondheidscheck Darm plus
Gluten
Heliobacter Pylori
Parasieten
Schimmel ontlastingstest
Viscera ontlastingstest
Zonuline*

Test-voorbereiding

Let op!

De inname van probiotica kan het darmmilieu aanzienlijk beïnvloeden. Wij raden aan om tenminste een week voor de test met het gebruik van probiotische preparaten te stoppen. De test mag bovendien pas uitgevoerd worden nadat de antibioticatherapie is beëindigd. De wachttijd moet minimaal 2 weken bedragen en liefst met uw therapeut besproken worden.

Vlakspoeltoilet:

„Deo-middelen“ verwijderen, naspoeien, ontlasting niet met urine vermengen

Diepspoeltoilet:

Meegelieferd ontlastingsopvangmateriaal (hulpmiddel voor de afname van het ontlastingsmonster) gebruiken

Test-Uitvoering

1. Gebruik de afnamelepel uit het monsterbuisje om op 3 verschillende plaatsen uit de ontlasting monsters te nemen.
2. Doe de ontlasting in het monsterbuisje (1/2 busje)
3. Sluit het busje goed af
4. Plaats dit busje in het verzendbusje.
5. Stop het verzendbusje samen met het compleet ingevulde monsterbegeleidingsformulier in de verzendenvelop.

Het monster tot aan de verzending in de koelkast bewaren, echter niet invriezen!



*medivere GmbH Mainz
Vertegenwoordigd door:
Yours Healthcare
Borculo*

*Telefoon: +31 - (0)88 - 00 75 777
of info@medivere.nl*

De retourzending mag uitsluitend op **maandag en dinsdag** plaatsvinden en niet in het weekeinde of voor feestdagen.

Dank u voor uw medewerking!
Uw medivere-team