

Handleiding voor monsterafname

Ontlastingstest Darm Microbiom (plus)

Is uw testpakket volledig?

Kijkt u a.u.b. na of uw pakket volledig is.
Het moet bevatten:

- 1 Handleiding voor monsterafname
- 1 Handleiding voor opvragen diagnoseresultaten
- 1 Monsterbegeleidingsformulier
- 1 Garantiefomulier
- 1 Monsterbuisje met etiket in verzendbuisje
- 1 Microbiom monsterbuisje met etiket in verzendbuisje
**LET OP: De stabilisator is irriterend. A.u.b. niet uitgieten.
A.u.b. niet met de slijmvliezen in contact laten komen!**
- 1 Ontlastingopvangmateriaal
- 1 Verzendbuisje
- 1 Verzendenvelop



Test-voorbereiding

Vlakspoeltoilet:

„Deo-middelen“ verwijderen en naspoeien, De ontlasting mag niet met urine vermengd zijn.
Leg eventueel toiletpapier op het toilet, zodat de ontlastingsmonsters niet vervuild raken.

Diepspoeltoilet:

Bevestig het meegeleverde ontlastingopvangmateriaal op het achterste deel van de toiletzitting.
Het mag niet met water of urine in aanraking komen.

Verkrijgen van ontlastingsmonsters

A. Door middel van ontlastings-monsterbuisje (dat in het verzendbuisje zit)

1. Gebruik de afnamelepel uit het monsterbuisje om op 3 verschillende plaatsen uit de ontlasting monsters af te nemen.
2. Doe het monstermateriaal in het monsterbuisje tot de gemarkeerde vulhoogte (1/2 buisje).
3. Sluit het buisje goed af.
4. Schrijf op het buisje de naam van de ‚afnemer‘ en de afnamedatum.
5. Doe dit buisje in het verzendbuisje.
6. U kunt het monster tot aan de verzending in de koelkast bewaren (niet invriezen).




B. Door middel van het speciale microbiom-buisje

1. Haal het microbiom-monsterbuisje met het witte kapje en het etiket uit het hersluitbare zakje.
2. Schrijf eerst uw naam en de monsterafnamedatum op het etiket.
3. Open nu het monsterbuisje: houd hierbij het transparante busje met de ene hand vast en ook de daarboven liggende blauwe adapter met de duim en wijsvinger van dezelfde hand (Afb. 1).
4. Draai met de duim en wijsvinger van de andere hand de witte stick tegen de klok in en trek het witte afnamestaafje eruit (Afb. 2).
5. Prik met de punt van de witte stick op drie verschillende plaatsen in het ontlastingsmonster (Afb. 3). Let erop dat alleen de groeven van de top volledig met ontlasting gevuld zijn.
6. Steek de met het ontlastingsmonster bevochtigde afnamestaafje door de blauwe adapter in het transparante busje (Afb. 4).
7. Draai het witte kapje met de klok mee totdat deze in de blauwe adapter vastklikt (Afb. 5). Door de vergrendeling (vastklikken) wordt het uitlopen van de bufferoplossing voorkomen.
8. Steek het monsterbuisje in het verzendbuisje en sluit dit zorgvuldig.
9. Tot aan de verzending kunt u het monster in de koelkast bewaren.




Afb. 1

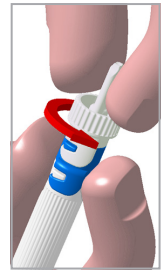


Afb. 2




Afb. 3

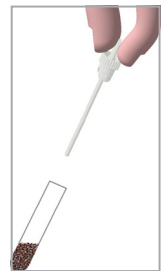

Afb. 3

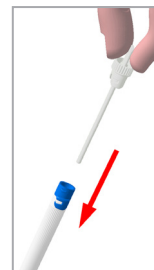

Afb. 4

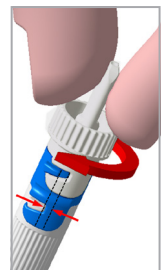

Afb. 5

Verzending van de monsters

Stop de verzendbuisjes met het ingevulde, ondertekende monsterbegeleidingsformulier in de verzendenvolp en sluit deze met zorg. Verwijder hiervoor de beschermfolie aan de binnenkant van het blauwe plakband en druk de sluitpunten stevig tegen elkaar aan.

Let op: De envelop kan daarna niet meer geopend worden..

Breng de ingepakte monsters nog dezelfde dag naar het postkantoor of gooi ze in de brievenbus.

De retourzending mag uitsluitend op maandag en dinsdag plaatsvinden en niet in het weekeinde of voor feestdagen.

Gooi bij extreme hitte of bij vorst het monster niet in de brievenbus, maar geef het monster bij voorkeur af bij de balie van het postkantoor.

Dank u voor uw medewerking!
Uw Medivere-team



medivere GmbH Mainz
Vertegenwoordigd door:
Yours Healthcare
Bosberg 41
7271 LE Borculo

Telefoon: +31 -(0)88-00 75 777
of info@medivere.nl