

Handleiding voor monsterafname

Bewaar het serie- en het codenummer van uw testset!

Het serie- en het codenummer treft u aan op de binnen- of buitenzijde van het testpakket. Het serienummer bevat 8 cijfers en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 4 cijfers.

Aanwijzingen voor het opvragen van de uitslagen

Monsterbegeleidingsformulier: Veld „Inzender-etiket“

Wanneer u een uitslag met therapie-advies wilt ontvangen, vul dan in het veld „Inzender-etiket“ het praktijkadres van uw behandelend therapeut of arts in. Uw therapeut ontvangt dan een uitslag met aanvullend een therapie-advies. NB: Aan particulieren worden nooit therapie-adviezen verstrekt.

Monsterbegeleidingsformulier / Download van uw uitslagen

Als u op het monsterbegeleidingsformulier alle persoonsgegevens volledig invult, dan ontvangt u uw uitslag automatisch per post toegestuurd. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid de uitslag via internet in te zien en te downloaden.

Om uw uitslag te downloaden gaat u naar onze website www.medivere.nl en klik op het tabblad ‚uitslag opvragen‘. Onder „Uitslag opvragen“ vult u het serie- en codenummer van uw testpakket en uw geboortedatum in. Het serie- en het codenummer treft u aan op de binnen- of buitenzijde van het testpakket. Het serienummer bevat 8 cijfers en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 4 cijfers.

Na het invullen van serienummer, code en geboortedatum klikt u op „uitslag opvragen“ om uw persoonlijke uitslag te bekijken.

Wanneer u een anonieme uitslag (zonder naam en adresgegevens) wenst, dan vult u op het monsterbegeleidingsformulier alleen uw geslacht en geboortedatum in. Let op: deze gegevens moeten echt ingevuld worden, anders is er geen vergelijking mogelijk met mensen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijdscategorie.

Wilt u een anonieme uitslag, dan is toesturen van de uitslag per post niet mogelijk en kunt u deze alleen online inzien en (wanneer gewenst) downloaden.

Garantie

Wij willen graag dat u tevreden bent met ons product. Mocht uw testpakket niet compleet zijn, verkeerd zijn ingepakt, of is tijdens het uitvoeren van de test iets misgegaan, neem dan contact met ons op. Bel naar **088-0075777** of mail naar info@medivere.nl. Houd het serie- en codenummer van uw testset bij de hand. Deze nummers kunt u vinden aan de binnen- of buitenkant van uw testset. Wij sturen u zo spoedig mogelijk nieuwe onderdelen of een vervangend testpakket toe.



*medivere GmbH Mainz
Vertengwoordigd door:
Yours Healthcare
Borculo*

*Telefoon: +31-(0)88-0075777
of
info@medivere.nl*

Handleiding voor monsterafname

Eerste Ochtendurine gestabiliseerd

Vooraf: Lees eerst de handleiding **helemaal** door voordat u aan de uitvoering van de test begint!

Is uw testpakket volledig?

Controleer a.u.b. of uw testset volledig is. Het moet bevatten:

- 1 Handleiding voor monsterafname
- 1 Handleiding voor diagnoseresultaten
- 1 Monsterbegeleidingsformulier
- 1 Garantieformulier
- 1 Urinebuisje met stabilisator (zoutzuur) in verzendbuisje met waarschuwingssticker **(Let op: etsend!)**
- 1 Urinebeker
- 1 Verzendenvelop

Deze handleiding geldt voor de volgende testen:

*Candida
Nitrostress®
Organix®-depressie
Organix®-dysbiose*

Risico op letsel!
Let op: bewaar deze testset buiten het bereik van kinderen.



Om de meetresultaten bij de nitrostress urinetest niet te vervalsen, verzoeken wij u om minimaal 48 uur voor en tijdens de monsternaam af te zien van het gebruik van vitamine B12-preparaten.

Test-Voorbereiding

We verzoeken u met het onderstaande rekening te houden.

1. Vermijd de inname van grote hoeveelheden vloeistof (meer dan 1 liter) in de avond en nacht voor de monsternaam.
2. Let u er a.u.b. op, dat er minimaal 8 uur tussen de laatste maaltijd en de monsternaam zit.
3. **Belangrijke informatie voor vrouwen:** doe deze test niet tijdens uw menstruatie.

Test-Uitvoering

1. Gebruik voor de monsternaam van de eerste ochtendurine de urine halverwege: Laat eerst ca. 3 seconden urine in het toilet lopen. Vang vervolgens ca. 25 ml urine op in de urinebeker, zonder de urinestraal te onderbreken. De urinebeker moet ongeveer tot de helft gevuld worden. De overige urine laat u weer weglopen in het toilet.
2. Neem het urinebuisje met de stabilisator uit het verzendbuisje (met de waarschuwingssticker).
3. Giet de urine uit de urinebeker in het urinebuisje met de stabilisator. Het urinebuisje moet tot aan de 25 ml-markering gevuld zijn.

4. Sluit het urinebuisje zorgvuldig en draai 'm 2-3 maal ondersteboven.
5. Noteer op het etiket de naam van de monsternemer en de datum van monstername en plak het etiket op het urinebuisje.
6. Stop het urinebuisje in het verzendbuisje en sluit het verzendbuisje zorgvuldig.
7. De urine die nog in de urinebeker zit, giet u weer in het toilet.
8. De urinebeker kunt u met het huisvuil weggoaien.
9. Doe het verzendbuisje samen met het ingevulde monsterbegeleidingsformulier in de bijgesloten verzendvelop en stuur deze per post aan ons laboratorium retour.

De retourzending moet op maandag en dinsdag (voor de buslichting) plaatsvinden en niet in het week-einde of voor feestdagen.

Dank u voor uw medewerking!
Uw medivere-team



medivere GmbH Mainz
Vertegenwoordigd door:
Yours Healthcare
Borculo

Telefoon: +31 - (0)88 - 00 75 777
of info@medivere.nl